



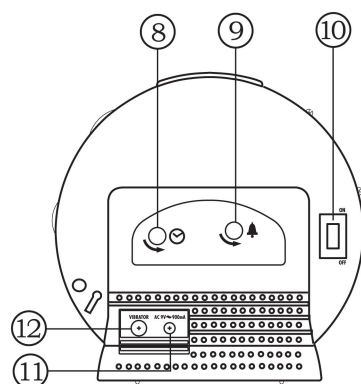

Sonic Alert

America's Leader in Visual Alerting Systems.

Réveil et vibreur SBA475SS

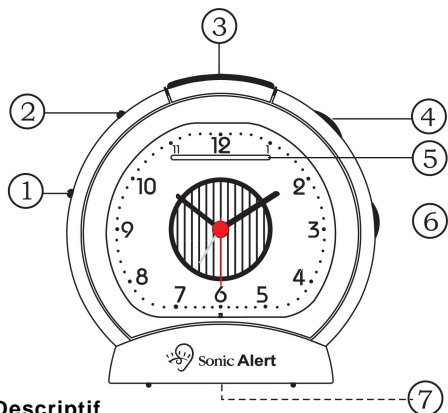

Descriptif

- 1 - Sélecteur d'alarme
- 2 - Réglage de luminosité d'écran
- 3 - Bouton «Sommeil»
- 4 - Réglage du volume
- 5 - Flash lumineux de sonnerie
- 6 - Réglage de la tonalité
- 7 - Compartiment batterie
- 8 - Réglage de l'heure
- 9 - Réglage de l'heure de réveil
- 10 - Marche/Arrêt éclairage écran
- 11 - Prise adaptateur secteur
- 12 - Prise vibreur





Vibreur



Sonic Alert

America's Leader in Visual Alerting Systems.

Réveil et vibreur SBA475SS

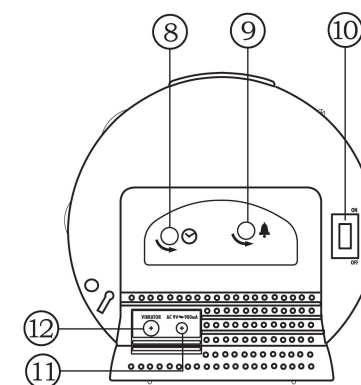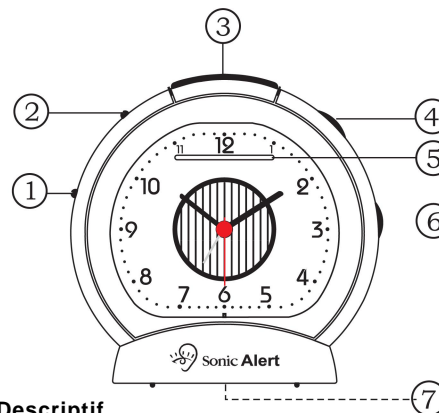

Descriptif

- 1 - Sélecteur d'alarme
- 2 - Réglage de luminosité d'écran
- 3 - Bouton «Sommeil»
- 4 - Réglage du volume
- 5 - Flash lumineux de sonnerie
- 6 - Réglage de la tonalité
- 7 - Compartiment batterie
- 8 - Réglage de l'heure
- 9 - Réglage de l'heure de réveil
- 10 - Marche/Arrêt éclairage écran
- 11 - Prise adaptateur secteur
- 12 - Prise vibreur



Vibreur

Installation de la pile (non fournie)

En cas de coupure secteur, la pile assure un fonctionnement minimum du réveil (affichage de l'heure). les fonctions rétro éclairage, vibreur et alarme ne sont pas assurées.

- Ouvrir le couvercle du compartiment à pile.
- Insérez une pile alcaline sans mercure (type AA, 1.5V) en respectant les polarités.
- Réfermez le compartiment à pile.

Installation de l'adaptateur secteur

- Branchez le cordon de l'adaptateur secteur à l'arrière de votre réveil (AC 9V).
- Branchez l'adaptateur secteur à votre prise de courant* (230V).

(*) Classé "tension dangereuse" selon la norme EN60950.

Réglage de l'heure

Tournez le bouton (8) situé à l'arrière de votre réveil pour régler l'heure.

Réglage de l'alarme

Tournez le bouton (9) situé à l'arrière de votre réveil pour régler l'heure de l'alarme.

Installation de la pile (non fournie)

En cas de coupure secteur, la pile assure un fonctionnement minimum du réveil (affichage de l'heure). les fonctions rétro éclairage, vibreur et alarme ne sont pas assurées.

- Ouvrir le couvercle du compartiment à pile.
- Insérez une pile alcaline sans mercure (type AA, 1.5V) en respectant les polarités.
- Réfermez le compartiment à pile.

Installation de l'adaptateur secteur

- Branchez le cordon de l'adaptateur secteur à l'arrière de votre réveil (AC 9V).
- Branchez l'adaptateur secteur à votre prise de courant* (230V).

(*) Classé "tension dangereuse" selon la norme EN60950.

Réglage de l'heure

Tournez le bouton (8) situé à l'arrière de votre réveil pour régler l'heure.

Réglage de l'alarme

Tournez le bouton (9) situé à l'arrière de votre réveil pour régler l'heure de l'alarme.

Sélection du type d'alarme

Sélectionnez le type d'alarme à l'aide de l'interrupteur (1) **VIB BUZZ/VIB/BUZZ/OFF** situé sur le côté gauche de votre réveil.

VIB BUZZ : Vibreur + Alarme

VIB : Vibreur seul

BUZZ : Alarme seule

OFF : Arrêt

Note : quelque soit le type d'alarme choisi, lorsque le réveil sonne les voyants lumineux (5) et l'écran clignotent.

Fonction « Sommeil »

Lorsque votre réveil sonne, appuyez sur le bouton **SNOOZE** en haut du réveil pour arrêter l'alarme pendant 4 mins.

L'alarme redémarre après 4 mins de silence et ainsi de suite pendant 40 mins environ.

Arrêt de l'alarme

Placez l'interrupteur (1) situé à gauche du réveil sur **OFF** pour arrêter définitivement l'alarme.

Réglage du volume et de la tonalité de l'alarme

Un bouton **VOL** (4) situé à droite du réveil permet de régler le volume. Le bouton **TONE** (6) règle la tonalité.

Ecran lumineux

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran à l'aide de l'interrupteur (2) situé à gauche du réveil :

HIGH : fort

LOW : faible

Placez l'interrupteur (10) situé à l'arrière du réveil sur **OFF** pour désactiver l'écran lumineux durant l'alarme.

Placez l'interrupteur (10) sur **ON** pour activer l'écran lumineux durant l'alarme.

Si l'interrupteur (10) est sur **OFF**, un appuie sur la touche **SNOOZE** active l'écran lumineux.

Option vibreur

Le vibreur a été conçu pour les personnes ayant des problèmes auditifs ou souhaitant se faire réveiller en toute discrétion.

- Si vous désirez utiliser le vibreur, connectez le dans la prise **VIBRATOR** (12) située à l'arrière du réveil.
- Sélectionnez un des deux types d'alarme faisant appel au vibreur (**VIB BUZZ** ou **VIB**).
- Placez le vibreur sous votre oreiller.
- Lorsque l'heure du réveil est arrivée, le vibreur est activé.

Important: Pour votre sécurité, ne connectez que le modèle de vibreur fourni, tout autre modèle de vibreur risquerait d'endommager votre réveil.

Garanti :

Ce réveil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale du réveil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème, rapprochez-vous de votre point de vente.

Raccordement électrique :

L'appareil est prévu pour fonctionner avec un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme EN60950). Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Distribué par:


Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe
www.geemarc.com



UGSBA475SS_F ED.01

Sélection du type d'alarme

Sélectionnez le type d'alarme à l'aide de l'interrupteur (1) **VIB BUZZ/VIB/BUZZ/OFF** situé sur le côté gauche de votre réveil.

VIB BUZZ : Vibreur + Alarme

VIB : Vibreur seul

BUZZ : Alarme seule

OFF : Arrêt

Note : quelque soit le type d'alarme choisi, lorsque le réveil sonne les voyants lumineux (5) et l'écran clignotent.

Fonction « Sommeil »

Lorsque votre réveil sonne, appuyez sur le bouton **SNOOZE** en haut du réveil pour arrêter l'alarme pendant 4 mins.

L'alarme redémarre après 4 mins de silence et ainsi de suite pendant 40 mins environ.

Arrêt de l'alarme

Placez l'interrupteur (1) situé à gauche du réveil sur **OFF** pour arrêter définitivement l'alarme.

Réglage du volume et de la tonalité de l'alarme

Un bouton **VOL** (4) situé à droite du réveil permet de régler le volume. Le bouton **TONE** (6) règle la tonalité.

Ecran lumineux

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran à l'aide de l'interrupteur (2) situé à gauche du réveil :

HIGH : fort

LOW : faible

Placez l'interrupteur (10) situé à l'arrière du réveil sur **OFF** pour désactiver l'écran lumineux durant l'alarme.

Placez l'interrupteur (10) sur **ON** pour activer l'écran lumineux durant l'alarme.

Si l'interrupteur (10) est sur **OFF**, un appuie sur la touche **SNOOZE** active l'écran lumineux.

Option vibreur

Le vibreur a été conçu pour les personnes ayant des problèmes auditifs ou souhaitant se faire réveiller en toute discrétion.

- Si vous désirez utiliser le vibreur, connectez le dans la prise **VIBRATOR** (12) située à l'arrière du réveil.
- Sélectionnez un des deux types d'alarme faisant appel au vibreur (**VIB BUZZ** ou **VIB**).
- Placez le vibreur sous votre oreiller.
- Lorsque l'heure du réveil est arrivée, le vibreur est activé.

Important: Pour votre sécurité, ne connectez que le modèle de vibreur fourni, tout autre modèle de vibreur risquerait d'endommager votre réveil.

Garanti :

Ce réveil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale du réveil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème, rapprochez-vous de votre point de vente.

Raccordement électrique :

L'appareil est prévu pour fonctionner avec un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme EN60950). Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Distribué par:


Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe
www.geemarc.com



UGSBA475SS_F ED.01